


Pince à papier toilettes Etac Torkel

La toilette intime est hautement prioritaire pour chacun.

Une plus grande intimité

Les utilisateurs qui ont du mal à saisir des objets ou à se mouvoir peuvent utiliser la pince Torkel pour attraper du papier toilettes, un gant de toilette ou une petite serviette. La pince Torkel peut être désinfectée et immergée dans de l'eau bouillante.


Mode d'emploi de la pince à papier toilettes Torkel :

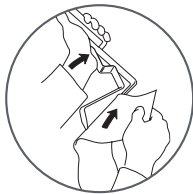

1. Déchirez un morceau de papier toilettes (environ 40 cm). Ouvrez la pince en pressant le manche, puis glissez le papier entre les pinces.



2. Enroulez le papier lâchement autour de la pince de manière à ce qu'il en recouvre la pointe.

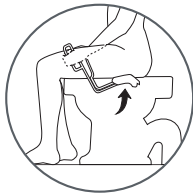

3. Essuyez-vous.



4. Ouvrez la pince et secouez-la pour que le papier utilisé tombe.



Description **N° d'article**
Pince à papier toilettes Torkel 80304001

Dimensions
Longueur : 33 cm

Matériau
Plastique polyamidique

Poids
100 g

Conception
Designkonsulterna



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.